



ULTRA⁺

Plus Ultra

**Oltre i confini
dello sbiancamento
in studio**

BLANCO[®]NE

Lo sbiancamento dentale per te

NON PLUS ULTRA?

Non plus ultra è una locuzione latina che significa "non più avanti"

Storicamente era riferita alle Colonne di Ercole che rappresentavano la fine del mondo conosciuto.



Lo **sbiancamento alla poltrona con perossidi ad elevata concentrazione** è l'unica opzione in grado di fornire il massimo risultato sbiancante in un'unica seduta in studio.

A differenza di un trattamento domiciliare, che produce risultati graduali e quindi meno percepibili dal paziente, questo tipo di trattamenti è in grado di **affrontare anche le discromie più gravi**, fornendo un **risultato immediato senza dover indossare le mascherine per settimane**.

Con una notevole differenza prima e dopo, prodotta in studio per mano del professionista, anziché a casa dal paziente, questo tipo di trattamenti rappresenta il **"non plus ultra" negli sbiancamenti professionali**, in grado di soddisfare quei **pazienti altamente motivati all'estetica del sorriso con elevate aspettative e possibilità di spesa**.

Questi pazienti **si aspettano il massimo in termini di risultato sbiancante e durata nel tempo...** e naturalmente vogliono tutto questo **subito**.



Massimo risultato, durevole nel tempo e subito. Sì, ma con quali limiti?



I limiti dello sbiancamento in studio

Applicazioni prolungate di **perossidi di idrogeno ad alta concentrazione in sedute di oltre un'ora**, non solo risultano **poco confortevoli per il paziente**, ma portano inevitabilmente ad una **disidratazione dello smalto**.

In questo modo si "droga" il risultato sbiancante producendo una superficie dentale dall'intenso aspetto bianco ma opaco.

Questo "effetto bianco" avrà una **regressione a breve termine** e, in certi casi (fumatori, bevitori di tè/caffè) retrocederà **perfino rispetto al tono pre-trattamento** in assenza di una **dieta bianca**.

L'impiego di elevate concentrazioni di perossido d'idrogeno, in combinazione con lunghi tempi di contatto (40-60 minuti), genera una **"fase liquida"** che consente al perossido di **penetrare facilmente nelle micro fratture dello smalto e sotto la protezione gengivale**.

In questo modo si **aumenta il rischio di incorrere in effetti indesiderati**.

Secondo un recente sondaggio¹, i disagi più grandi riscontrati a seguito di un trattamento di sbiancamento professionale sono risultati:

- **29% Sensibilità dei denti prolungata (oltre 1 giorno)**
- **25% Sensibilità dei denti transitoria (max 24h)**
- **12% Irritazione/sbiancamento delle gengive**
- **5% bruciate sulle labbra o sulla pelle**

Non bisogna mai dimenticarsi che si sta utilizzando **uno sbiancamento medicale estremamente aggressivo, che non deve spingersi oltre i suoi limiti** nel tentativo di dare riscontro alle attese del paziente.

Con un perossido di idrogeno al 40% bastano 60 minuti per aggredire lo smalto...

Cosa può succedere ripetendo più volte a breve distanza?

Per compensare questi effetti indesiderati, tutti i trattamenti sbiancanti con perossidi includono, nella formulazione o come post trattamento, **agenti desensibilizzanti e remineralizzanti**. Alcuni raccomandano addirittura l'assunzione di **analgesici prima e dopo il trattamento**.

1 - La procedura di sbiancamento per i pazienti italiani
Keystone Dental Monitor
Febbraio 2022



PLUS ULTRA

*In contrapposizione a non plus ultra significa:
"Andare oltre" superare i propri limiti.*

*Nel 1492 il genovese Cristoforo Colombo andò oltre.
Deciso a superare i propri limiti... Rivelò un Nuovo Mondo.*

ULTRA+

**Oltre i confini
dello sbiancamento in studio**


Il massimo per il tuo paziente

ULTRA⁺

Efficacia sbiancante mai vista prima

I test in vitro condotti presso il dipartimento DICCA della facoltà di ingegneria meccanica dell'Università degli Studi di Genova hanno dimostrato la straordinaria efficacia di BlancOne® Ultra⁺ nell'incrementare la luminosità della struttura dentale rispetto ai migliori trattamenti alla poltrona oggi presenti sul mercato.

Incremento di luminosità

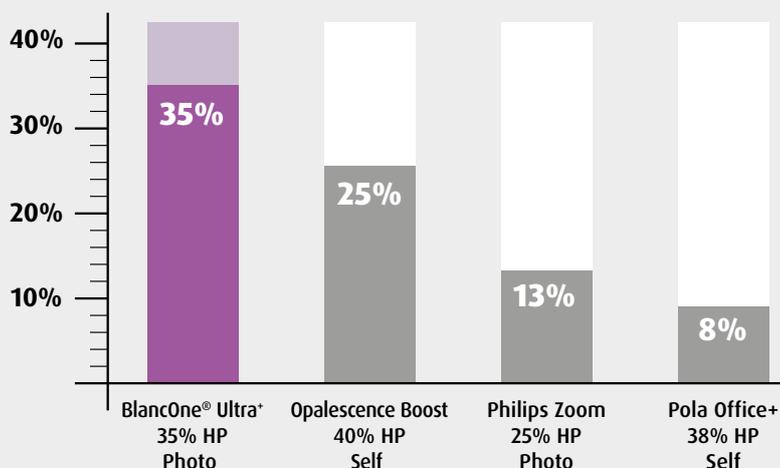


ULTRA⁺

Tempi di contatto più che dimezzati


Questi risultati sono stati ottenuti col protocollo base di BlancOne® Ultra⁺, 3 cicli da 8 minuti, rispetto ai protocolli massimi raccomandati dai competitor, coniugando così la massima efficacia con il comfort del paziente e il ridotto impegno della poltrona.



BlancOne® Ultra⁺
(3x8=24 minuti)

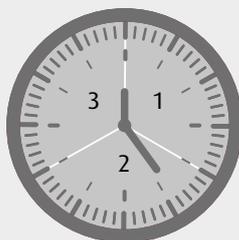

Opalescence Boost
(3x20=60 minuti)

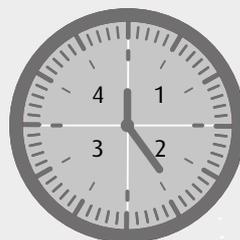

Philips Zoom
(4x15=60 minuti)



Pola Office+
(4x8=32 minuti)



Chiara Lorenzi



«Sono molto soddisfatta dei risultati ottenuti con il nuovo Ultra⁺.

Mi piace moltissimo la consistenza cremosa che lo rende facile da miscelare, si stende benissimo.

Il gel si rimuove bene e si risciacqua facilmente.

Ottima l'efficacia sbiancante che si è rivelata superiore»

2000



I dentisti ricercatori Piergallini e Loupis iniziano le loro ricerche nel campo della fotochimica

2010



Tecnologia BlancOne® 1.0 Lo sbiancamento alla velocità della luce per la prima volta sul mercato

ULTRA⁺

Risultati stabili nel tempo

Grazie ai veloci tempi di applicazione, il risultato ottenuto è al 100% reale sbiancamento e non disidratazione. Il bianco ottenuto risulta naturale, luminoso e stabile evitando una rapida regressione con il reidrarsi del dente.

L'elevato rilascio di ossigeno singoletto all'interno della struttura del dente assicura un proseguimento dell'azione sbiancante nelle 72 ore successive con un ulteriore miglioramento.


ULTRA⁺

Senza sensibilità dentinale


La nuova matrice del gel sbiancante BlancOne® Ultra⁺ è priva di "fase liquida", minimizzando così la possibilità di infiltrazione del perossido nelle micro fratture dello smalto e al di sotto della protezione gengivale.

In questo modo viene virtualmente eliminato il rischio di indurre sensibilità dentinale e dolorose ustioni ai tessuti gengivali. Ultra⁺ non contiene agenti desensibilizzanti.

Stabilità del risultato

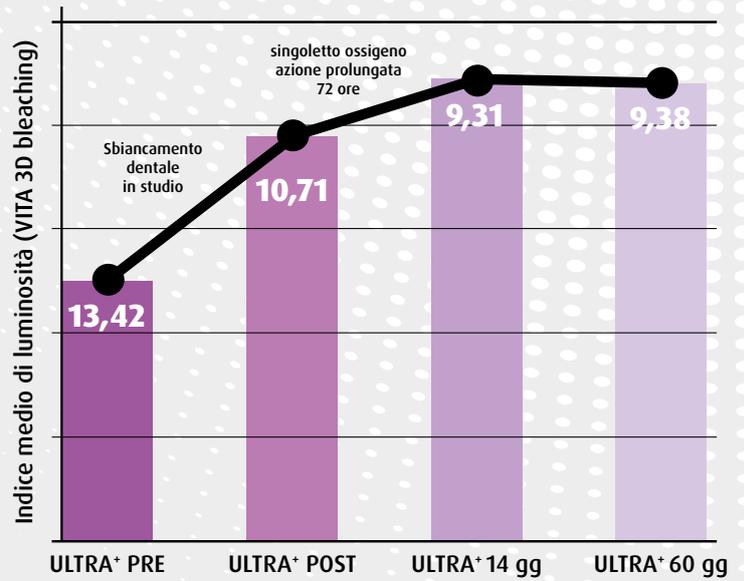

Incidenza di ipersensibilità

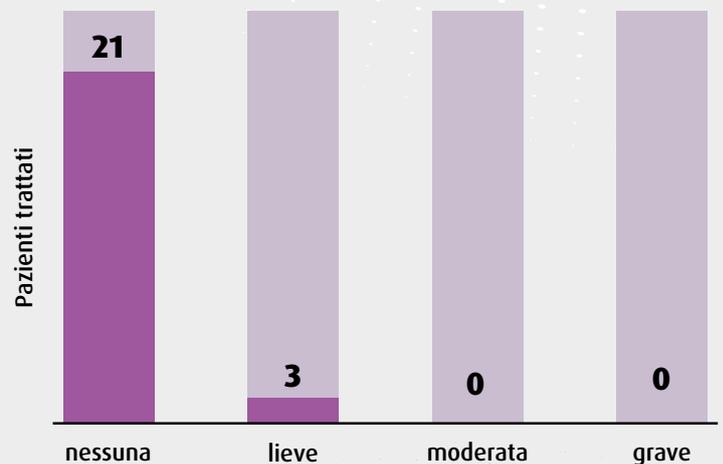

Valentino Natoli



«Ho trovato il prodotto molto maneggevole, semplice da utilizzare e senza indurre sensibilità post-operatoria. Risultato eccellente e pazienti super soddisfatti.»



Romina Rossoli



«Ho trovato ottima la luminosità finale e la stabilità del risultato, con grande soddisfazione dei miei pazienti. Pratico e flessibile il confezionamento con siringhe monodose quando, ad esempio, bisogna sbiancare solo i canini.»

2016

*Tecnologia BlancOne® 2.0
Il primo sbiancamento
post igiene in 10 minuti
conquista il mercato*

2022

*Tecnologia BlancOne® 3.0
La fotochimica porta
il power bleaching
oltre i suoi limiti*

ULTRA

Massimo rispetto per lo smalto

I test in vitro condotti presso il dipartimento DICCA della facoltà di ingegneria meccanica dell'Università degli Studi di Genova, dimostrano che al crescere della percentuale di perossido contenuta nei gel sbiancanti e conseguentemente a tempi molto prolungati di contatto sugli elementi dentari vanno ad aumentare i rischi di compromissione dell'integrità della struttura dello smalto.



Smalto non trattato



Smalto dopo 60 minuti
con perossido di idrogeno al 40%

Viceversa BlancOne® Ultra+, grazie alla minor concentrazione ed ai più rapidi tempi di contatto, crea soltanto una lieve e transitoria alterazione rispettando la superficie dello smalto, per questo non necessita e non contiene di agenti remineralizzanti.



Stefano Checchi
Silvia Fasoglio



*«Una nuova versione di prodotto
per ampliare ulteriormente le possibilità di trattamento
e rendere davvero esclusivo ciascun sbiancamento!»*



Giuseppe Lipani



*«Il prodotto sbiancante si è rivelato superiore, molto facile da miscelare, applicare e rimuovere.
Non ho rivelato nessun episodio di sensibilità, nè durante il trattamento nè successivamente.
I denti appaiono luminosi e non disidratati.
Ottimo il confezionamento monodose che lo rende versatile
permettendo di sbiancare senza sprechi un singolo dente o una sola arcata.»*



Giulia Zanconato



*«Credo davvero nel potere di un sorriso perché ho visto migliorare la vita
di così tanti pazienti utilizzando i prodotti BlancOne,
oggi ancora di più con il nuovo Ultra.»*

Il massimo per te

ULTRA+

Miscelazione gel-gel

La miscelazione e preparazione del gel BlancOne® Ultra+ avviene mediante l'accoppiamento delle due siringhe (photo booster + whitening gel) risultando facile e rapida.

ULTRA+

Consistenza cremosa

La consistenza cremosa permette una facile applicazione del gel sulla superficie dentale, aderisce senza appiccicare, non cola e si rimuove senza problemi.

ULTRA+

Confezioni monodose

BlancOne® Ultra+ è fornito in confezioni mono applicazione che garantiscono la massima performance del gel appena preparato e la massima flessibilità di utilizzo nella scelta del protocollo in base alle esigenze cliniche.

ULTRA+

Conservazione non refrigerata

Grazie alla nuova matrice del gel sbiancante, BlancOne® Ultra+ può essere conservato fuori dal frigorifero fino a 24 mesi dalla data di produzione.

ULTRA+

Due prodotti in uno

BlancOne® Ultra+ può essere usato sia sulla superficie del dente sia all'interno della camera pulpare, permettendo così di trattare in studio sia denti vitali che non vitali.



Aldo Mazzella



«Il nuovo Ultra è performante anche per denti discromico-devitali, l'ho utilizzato per varie sedute con risultati strepitosi, consigliatissimo.»



Claudio Pasquale



«Il prodotto BlancOne Ultra+ oggi soddisfa completamente le esigenze del professionista, sfruttando appieno la potenzialità di attivazione fotochimica del prodotto e garantendo ai nostri pazienti risultati eccezionali con ottima stabilità nel tempo.»

ARCUS⁺

Bleaching lamp

ULTRA⁺

Trattamenti



REF 012001

BlancOne® ULTRA+ Single Kit

3 x BlancOne ULTRA+ Cycle Pack:

1 x Whitening Gel 0,75ml

1 x Photo Booster 0,25ml

1 x BlancOne® Gingival Barrier 1,20ml



REF 012003

BlancOne® ULTRA+ Multi Kit

9 x BlancOne ULTRA+ Cycle Pack:

1 x Whitening Gel 0,75ml

1 x Photo Booster 0,25ml

CARE

Accessori



REF 019002

1 x BlancOne® Gingival Barrier 1,20ml



REF 030105

1 x BlancOne® Cheek Retractor - SMALL

REF 030106

1 x BlancOne® Cheek Retractor - MEDIUM

REF 030107

1 x BlancOne® Cheek Retractor - LARGE



REF 030108

30 x BlancOne® Face Protection

BlancOne® ULTRA⁺ è un dispositivo medico CE per il trattamento delle discromie dentali ad esclusivo uso professionale in studio da parte di dentisti e igienisti dentali.

BLANCONE®

www.blancone.eu/pro

helpdesk@blancone.eu



blancone



blancone_ids



blancone



blancone team pro (gruppo professionale)



IDS Spa - Via San Cristoforo, 28/10 - 17100 Savona - Italia

Tel. 019 862080 - Fax 019 2304865 - email: info@idsdental.it

www.idsdental.it