



BLANCONE[®]
Clean&White

Porta
le tue sedute d'igiene dentale
fra le stelle

BLANCCONE®

Clean & White

Igiene & Sbiancamento dentale



Clean & White
Xpower




Clean&White

**Igiene e sbiancamento dentale
in un'unica rapida e confortevole seduta**

Il programma **BlancOne® Clean&White** unisce,
in un'unica seduta,
i più avanzati protocolli e strumenti oggi disponibili
per un'**igiene dentale mini-invasiva** e confortevole
ad uno **sbiancamento dentale veloce**
e **privo di sensibilità**.



In soli
45'

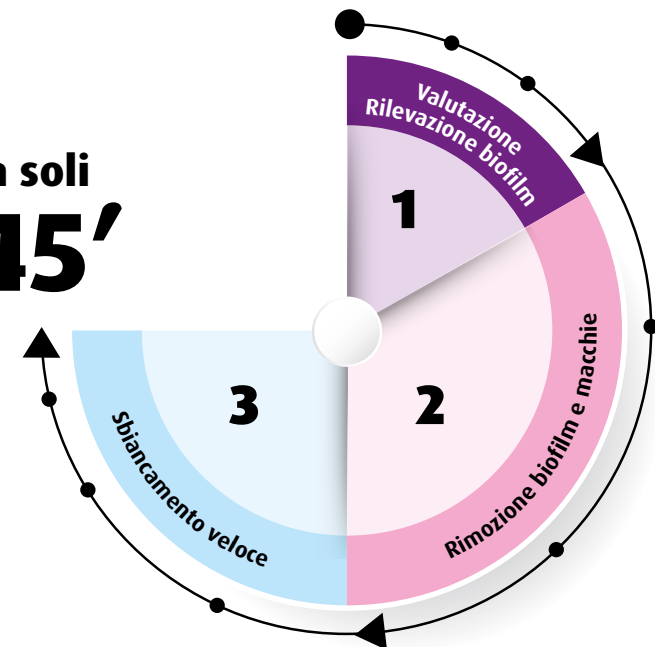



Vantaggi per il paziente

BlancOne® Clean&White porta i pazienti dello studio, in modo semplice, immediato e conveniente, verso **un'igiene dentale evoluta**: una seduta che **promuove la salute orale** e posiziona lo **sbiancamento delicato dei denti** come un'estensione naturale della seduta d'igiene dentale, trasformandola in **un'esperienza piacevole coronata da un sorriso smagliante**.

- **Benessere dentale:** una seduta d'igiene avanzata, veloce e confortevole abbinata ad un trattamento sbiancante rapido e indolore di soli 10 minuti.
- **Tecnologia avanzata:** grazie all'utilizzo combinato di polveri da profilassi e ablazione indolore abbinati ad uno sbiancamento sicuro ed efficace con attivazione fotochimica.
- **Massima delicatezza:** un trattamento veloce e mini-invasivo che non provoca dolore, sensibilità o irritazione ai tessuti orali.
- **Costo accessibile:** un trattamento di grande valore alla portata di tutti.



Vantaggi per lo studio

BlancOne® Clean&White è **una soluzione innovativa ed evolutiva** dell'igiene professionale verso un percorso irrinunciabile **per raggiungere e mantenere la salute e la bellezza di un sorriso radioso.**

La percezione ed **il valore attribuito dal paziente** alla seduta d'igiene **risulta estremamente amplificato, aumentando la sua compliance** nell'igiene domiciliare e **motivandolo a ripeterla frequentemente.**

- **Incremento e fidelizzazione dei pazienti:** intercetta nuovi pazienti e offri loro un servizio sicuro, innovativo e di alta qualità
- **Differenziazione dalla concorrenza:** posizionati come studio all'avanguardia dotato dei migliori dispositivi e protocolli
- **Seduta di igiene di livello avanzato:** utilizza Xpower, il dispositivo rivoluzionario che garantisce un'igiene delicata ed efficace grazie alla rimozione guidata del biofilm con le polveri da profilassi.

Più valore al tuo tempo

Il concetto Clean & White prevede **sedute di igiene dentale frequenti** che permettano di **mantenere la salute di denti e gengive** in una seduta più rapida e meno invasiva, **minimizzando la formazione e calcificazione del biofilm.**

Grazie al **dispositivo avanzato per l'igiene dentale Xpower** è possibile operare una **veloce e confortevole rimozione del biofilm** con un'azione mirata, grazie all'uso del **rilevatore di placca**, utilizzando prevalentemente le **polveri per profilassi.**

La seduta viene completata con lo **sbiancamento veloce BlancOne® CLICK** che **ripristina la luminosità dello smalto in 10 minuti**, senza richiedere la protezione gengivale e **senza indurre sensibilità.**

Tutto questo in soli 45 minuti...

... con 10 minuti di completo relax per te e il tuo paziente!



Ricavi potenziali da una giornata di igiene dentale

Igiene tradizionale




12 sedute di igiene x € 80 cad
(prezzo medio Italia)

45'



€ 960
di ricavo
giornaliero

Clean & White Igiene + Sbiancamento

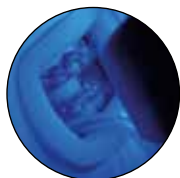


12 sedute Clean & White x € 149 cad
(Prezzo consigliato al paziente)

45'



€ 1.788
di ricavo
giornaliero

Clean & White Igiene + Sbiancamento + Rituals

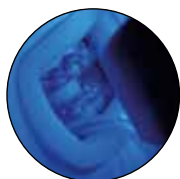


12 sedute Clean & White + Rituals x € 199 cad
(Prezzo consigliato al paziente)

45'



€ 2.388
di ricavo
giornaliero

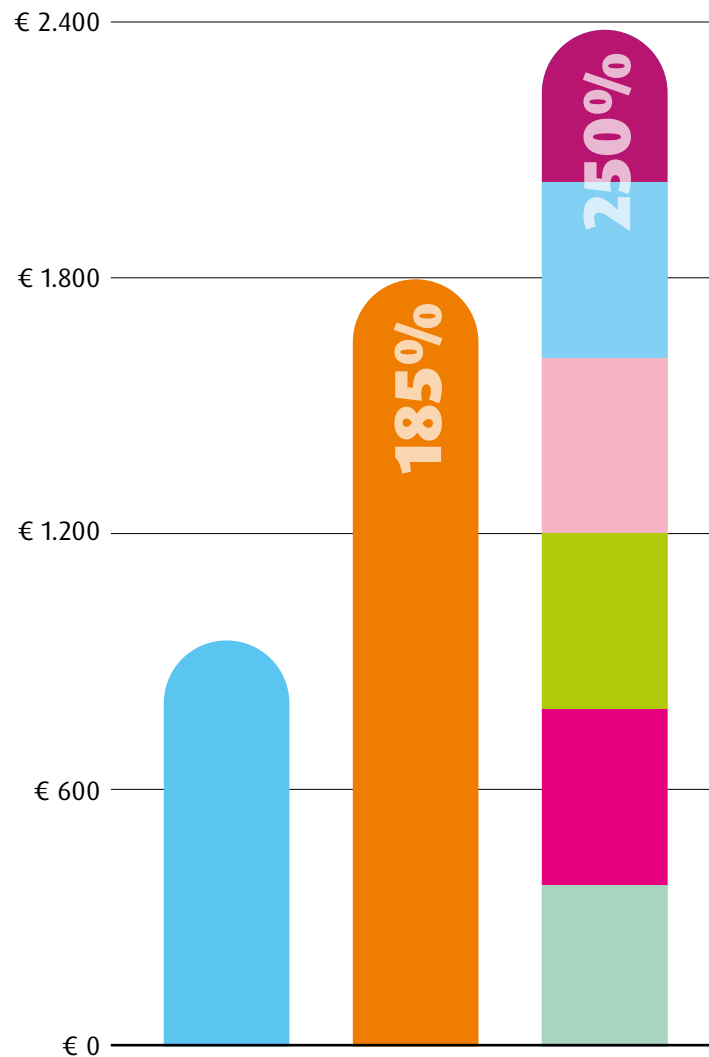

Crescita dei ricavi da igiene e odontoiatria estetica

Questa **nuova percezione** stimola il paziente a richiedere **trattamenti di sbiancamento più intensivi** (BlancOne® TOUCH, ULTRA e HOME) per ottenere **risultati ancora più gratificanti**, ad acquistare **prodotti di mantenimento** (BlancOne® RITUALS) e a valutare più favorevolmente **interventi di conservativa ed ortodonzia estetica**.

Clean&White diventa **il motore per la crescita** dei ricavi **del tuo studio** sia nell'area dell'igiene dentale che dell'odontoiatria estetica.

Clean&White

80%

«ho aumentato i miei business di sbiancamento»*

95%

«ho aumentato la compliance dei pazienti all'igiene dentale»*

95%

«ho aumentato la fidelizzazione dei pazienti»*

92%

«sono soddisfatto e raccomando BlancOne® CLICK ai colleghi»*

* CLICK customer experience 2020
700 dentisti e igienisti dentali italiani Keystone

Programmi e pacchetti

Grazie alla maggior frequenza,
la seduta diventa sempre più breve e confortevole.

Un ridotto tempo di utilizzo della poltrona,
permette di offrire al paziente vantaggiosi pacchetti annuali.

Clean&White		Prezzo consigliato al paziente
Seduta individuale	<ul style="list-style-type: none">- Visita di controllo- Rilevazione biofilm- Rimozione biofilm- Sbiancamento dentale veloce	€ 149
Clean&White Pacchetti annuali	Prezzo consigliato al paziente	Prezzo consigliato al paziente
2 sedute Ogni 6 mesi	€ 259	€ 129 a sessione
3 sedute Ogni 4 mesi	€ 359	€ 119 a sessione
4 sedute Ogni 3 mesi	€ 459	€ 109 a sessione
		Prezzo consigliato al paziente
Kit di mantenimento 3 mesi	<ul style="list-style-type: none">- Spazzolino sbiancante BRUSH- Penna sbiancante STICK- Gel Dentifricio sbiancante DUETTO Active- Gel dentifricio rigenerante DUETTO Care- Balsamo labbra 100% naturale LIPS (x2)	€ 49 solo con C&W



Specifiche tecniche:

Ingresso dell'adattatore di alimentazione.....	100VAC - 240VAC 50Hz/60Hz
Ingresso dell'unità principale.....	200VA
Frequenza.....	30kHz±5kHz
Pressione dell'aria in ingresso	5.5 bar-7.5 bar (0.55Mpa-0.75Mpa)
Temperatura dell'acqua.....	30°C
Uscita della polvere	0.1g/min-8g/min
Dimensioni	320*330*120mm
Peso.....	4.0 Kg



Clean & White
Xpower

Dispositivo avanzato 2 in 1 per l'igiene orale professionale

C&W Xpower unisce
un manipolo ablatore ad ultrasuoni ad alta frequenza
con fibra ottica al lucidatore ad aria ad elevata performance
con commutazione automatica
tra i due sistemi in base al manipolo impugnato.

5 modalità operative: General scaling, Perio, Endo, Air polishing e Cleaning

C&W Xpower permette una rapida e confortevole rimozione
di calcoli dentali, pigmentazioni, placca, depositi morbidi,
tartaro e macchie dalle superfici dentali,
manufatti protesiti, impianti ed attacchi ortodontici.
Il programma di pulizia permette una facile manutenzione
del dispositivo mantenendolo sempre efficiente e pronto all'uso.



5 manipoli con kit di sterilizzazione

S - Scaling

Manipolo per ablazione
supra-sub gengivale,
chiave dinamometria, cassetta

AP - Air Polishing

Manipolo per lucidatura ad aria
supra gengivale,
cassetta

PAP - Perio Air Polishing

Manipolo per lucidatura ad aria
sub gengivale ed interprossimale,
20 terminali monouso



S
2x



AP
2x



PAP
1x



Sistema di controllo touch screen LCD

L'ampio ed elegante pannello LCD 7 pollici di C&W Xpower permette una facile visione ed implementazione dei comandi, con possibilità di regolare, in modo accurato e con un semplice tocco, la potenza della vibrazione, flusso delle polveri ed il flusso dell'acqua.



Pedale multifunzionale wireless

C&W Xpower identifica e commuta automaticamente il pedale tra cablato e wireless.

Il pedale presenta comandi multi-funzione facili da operare.

La tecnologia bluetooth 5.0 ULP assicura un basso consumo e tempi di stand-by ultra-lunghi.



Modalità
Senza Acqua

BOOST


Modalità
Boost



Modalità
Pulizia

Serbatoio per la polvere con camera ad imbuto per un getto uniforme

Il serbatoio plug-and-play di C&W Xpower è facile da installare e pratico da caricare con la polvere. Il design aerodinamico a doppio radiante del serbatoio C&W Xpower assicura un getto uniforme e l'elevata efficacia del trattamento.

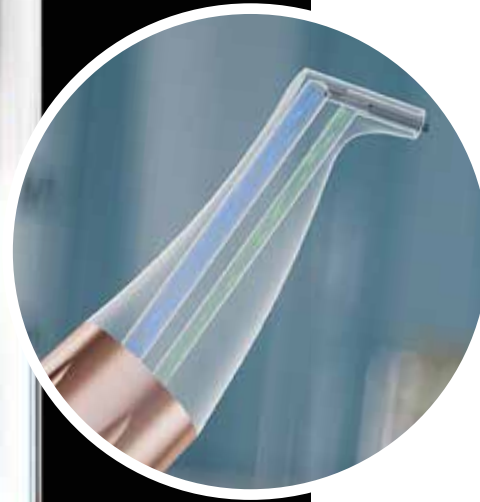

Sistema ad alta performance senza intasamenti

Equipaggiato con un dispositivo di filtraggio per assicurare aria asciutta ed evitare che la polvere si inumidisca, lo speciale ugello con controllo del processo di C&W Xpower riduce efficacemente l'intasamento evitando che la polvere si inumidisca attraverso il riflusso dell'acqua.




Ampio serbatoio per l'acqua e le soluzioni, facile da ricaricare

Il serbatoio dell'acqua da 800ml di C&W Xpower riduce la necessità di ricaricare l'acqua, rendendo comunque facile e veloce l'operazione.

C&W Xpower permette l'utilizzo di soluzioni chimiche come perossido d'idrogeno, ipoclorito di sodio e clorexidina per aumentare l'efficacia clinica del trattamento.

Le speciali pastiglie C&W Tabs assicurano un gradevole sapore ed una perfetta manutenzione dell'impianto idrico.

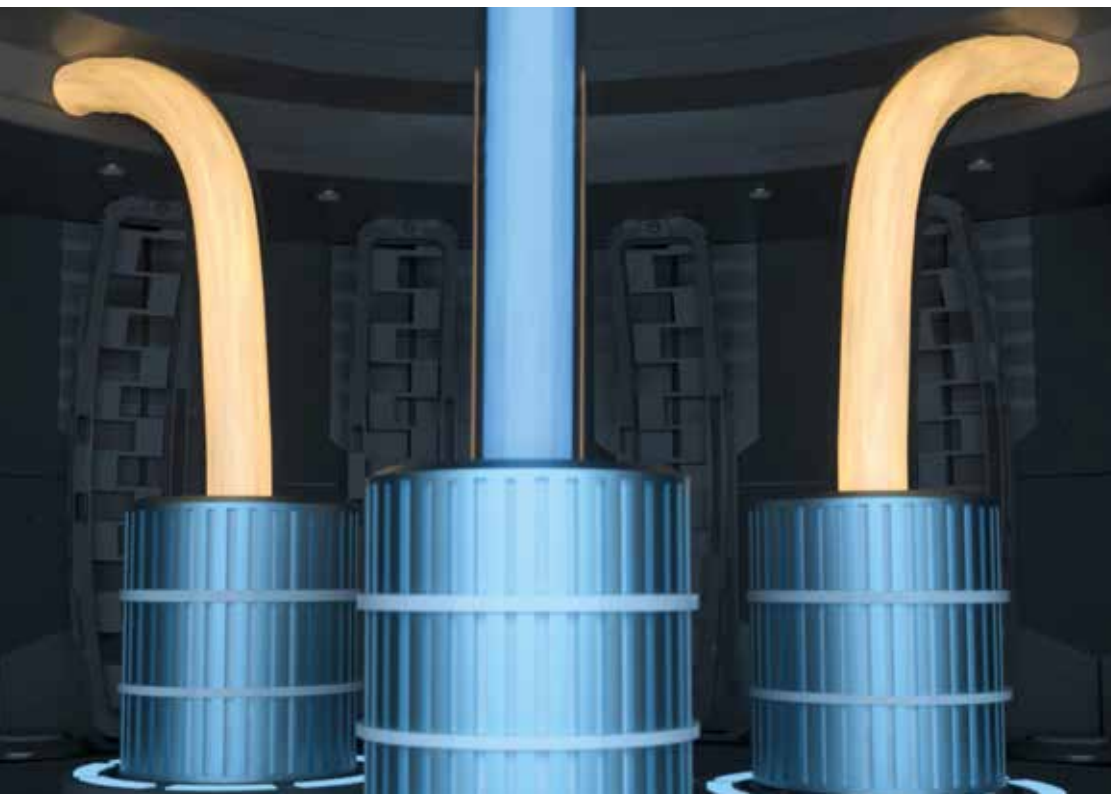

Controllo automatico della temperatura dell'acqua per il comfort del paziente

C&W Xpower è dotato di un impianto di riscaldamento automatico che mantiene l'acqua a temperatura omoterica (30°C) per assicurare una performance stabile ed un trattamento confortevole.

Vibrazione elittica per un'ablazione e lucidatura confortevole

C&W Xpower è dotato di un sistema automatico di tracciamento della frequenza, in base alla punta utilizzata e un'elevata frequenza con micro oscillazione (1-90μ) equivalente ad 1/3 del diametro di un capello.

La vibrazione con traiettoria ellittica attenua l'impatto sul dente e previene lo stimolo doloroso assicurando una ablazione estremamente confortevole per il paziente.


Speciali punte per ablazione super delicate

Puntale Perio in titanio (P59T)

per trattamento mininvasivo del cemento radicolare

Puntale rivestito (P90)

ultra delicato per la pulizia di impianti

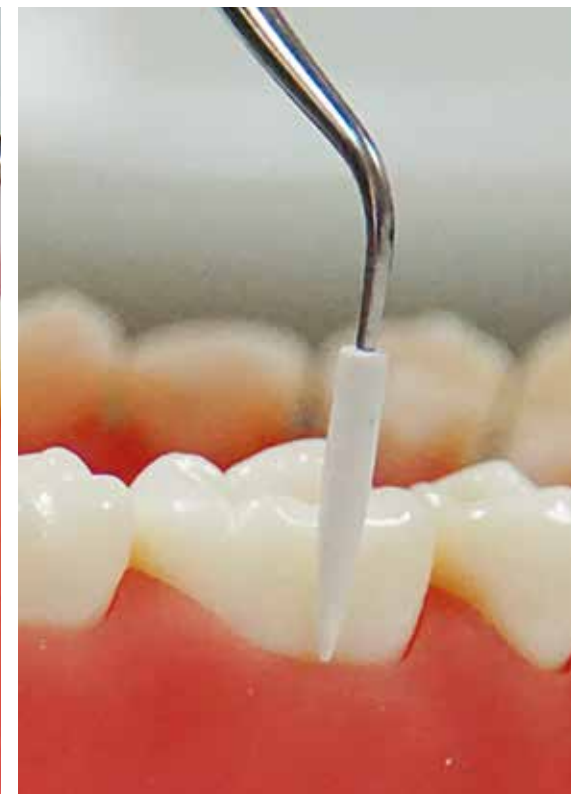

Ampia dotazione di serie

C&W Xpower ha un'ampia dotazione di serie inclusa:

- **5 manipoli:**
 - 2 Scaling (S),
 - 2 Air Polisher (AP),
 - 1 Perio Air Polisher (PAP)
- **2 serbatoi per le polveri:**
 - 1 per polveri FAST (65m μ),
 - 1 per polveri MILD (\leq 25m μ)
- **12 punte per ablatore:**
 - 1 per ablazione sopragengivale (G4),
 - 3 per ablazione subgengivale (P1, P3, P4),
 - 1 punta super confortevole in titanio per ablazione subgengivale (P59T),
 - 2 punte per levigatura radicolare (P2R, P2L),
 - 1 punta con terminale morbido per la pulizia di impianti (P95)
 - 4 punte endodontiche (E3, E3D, E6, E62)
- **2 polveri (bicarbonato 65m μ , glicina 65m μ)**
- **20 puntali perio monouso (manipolo PAP)**
- **4 cassette per sterilizzazione**
- **2 chiavi dinamometriche**
- **Set di aghi per la pulizia**
- **Pedale wireless**
- **Cavi, attacchi, accessori e ricambi**

REF 540300

Clean&White XPower

Ultrasonic Scaler & Air Polisher

CE 0123



Polveri da profilassi

**Comfort ottimale, mini invasività,
massima prevenzione**

Ingredienti a bassa durezza
e particelle fini riducono la possibilità
di danneggiare i tessuti molli e lo smalto.

Materiali anti-infiammatori,
anti-batterici e anti-carie per una pulizia
efficace e rapida.

REF 540301

Clean&White Xpower SBC 65

bicarbonato di sodio - FAST 65µm
confezione da 4 flaconi da 300 gr cad

REF 540303

Clean&White Xpower GLC 65

glicina - FAST 65µm
confezione da 4 flaconi da 200 gr cad

REF 540306

Clean&White Xpower GLC 25

glicina - MILD 25µm
confezione da 4 flaconi da 120 gr cad



Ampia gamma di applicazioni cliniche



Ablazione sopragengivale



Ablazione sopragengivale



Pulizia parodontale (>3mm)



Pulizia interprossimale



Pulizia di impianti e monconi



Pulizia attacchi ortodontici

	FAST	FAST	MILD
Modello	SBC65	GLC65	GLC25
Granulometria	65 pm	65 pm	25 pm
Composizione aromatica	bicarbonato di sodio carbonato di sodio silice	glicina silice	glicina silice
Specifiche dell'imballaggio	300g	200g	120g
pH	8.1	6	6
Impianto	✗	✗	✓
Apparecchi ortodontici	✗	✗	✓
Impianti	Composito ibrido	✗	✓
	Vetroionomero	✗	✓
Tessuti molli	Gengiva	✗	✓
	Lingua e palato	✗	✓
Denti	Macchie e principi di calcoli	✓	✓
	Smalto	✓	✓
	Macchie bianche sullo smalto	✗	✓
	Solchi e fessure	✗	✗
	Dentina	✗	✗

Punte per igiene dentale di serie

Sopragengivale

5400G4

G4
Rimozione sopragengivale ed interprossimale dei depositi

Pulizia impianti

5400P90

P90 Puntale morbido
Pulizia di impianti

Subgengivale

5400P1

P1
Rimozione dei depositi sottogengivali in tasche profonde

5400P3

P3
Rimozione dei depositi sottogengivali in tasche profonde

5400P4

P4
Rimozione dei depositi sottogengivali in tasche profonde

5400P59T

P59T Punta in titanio ultra comfort
Adatta a tutte le aree subgengivali, sia buccali che linguali

Levigatura radicolare

5400P2R

P2R
Strumento ricurvo a destra per rimuovere i calcoli dagli spazi sottili fra le radici e dalla forcazione

5400P2L

P2L
Strumento ricurvo a sinistra per rimuovere i calcoli dagli spazi sottili fra le radici e dalla forcazione

Punte per endodonzia

Altre punte per igiene

(non incluse nell'Xpower)

Endodonzia

5400E3

E3

Fusione della gutta-percha

5400E3D

E3D

Strumento diamantato per allargare il canale radicolare e l'accesso dei file

5400E6

E6

Strumento in titanio per la rimozione dei file endodontici rotti dal canale

5400E62

E62

File a superficie liscia per l'irrigazione canale

Sopragengivale

5400G1

G1

Rimozione dei depositi sopragengivale in tutti i quadranti

5400G2

G2

Rimozione di depositi calcificati sopragengivali negli anteriori

5400G3

G3

Rimozione dei depositi sopragengivali in tutti i quadranti compresi gli spazi interprossimali e l'area del solco

5400G5

G5

Rimozione dei depositi sopragengivali in tutti i quadranti

5400G6

G6


Rimozione di depositi sopragengivali voluminosi

Levigatura radicolare

5400P3D

P3D Punta diamantata

Punta diamantata per levigatura radicolare dopo la chirurgia parodontale al lembo

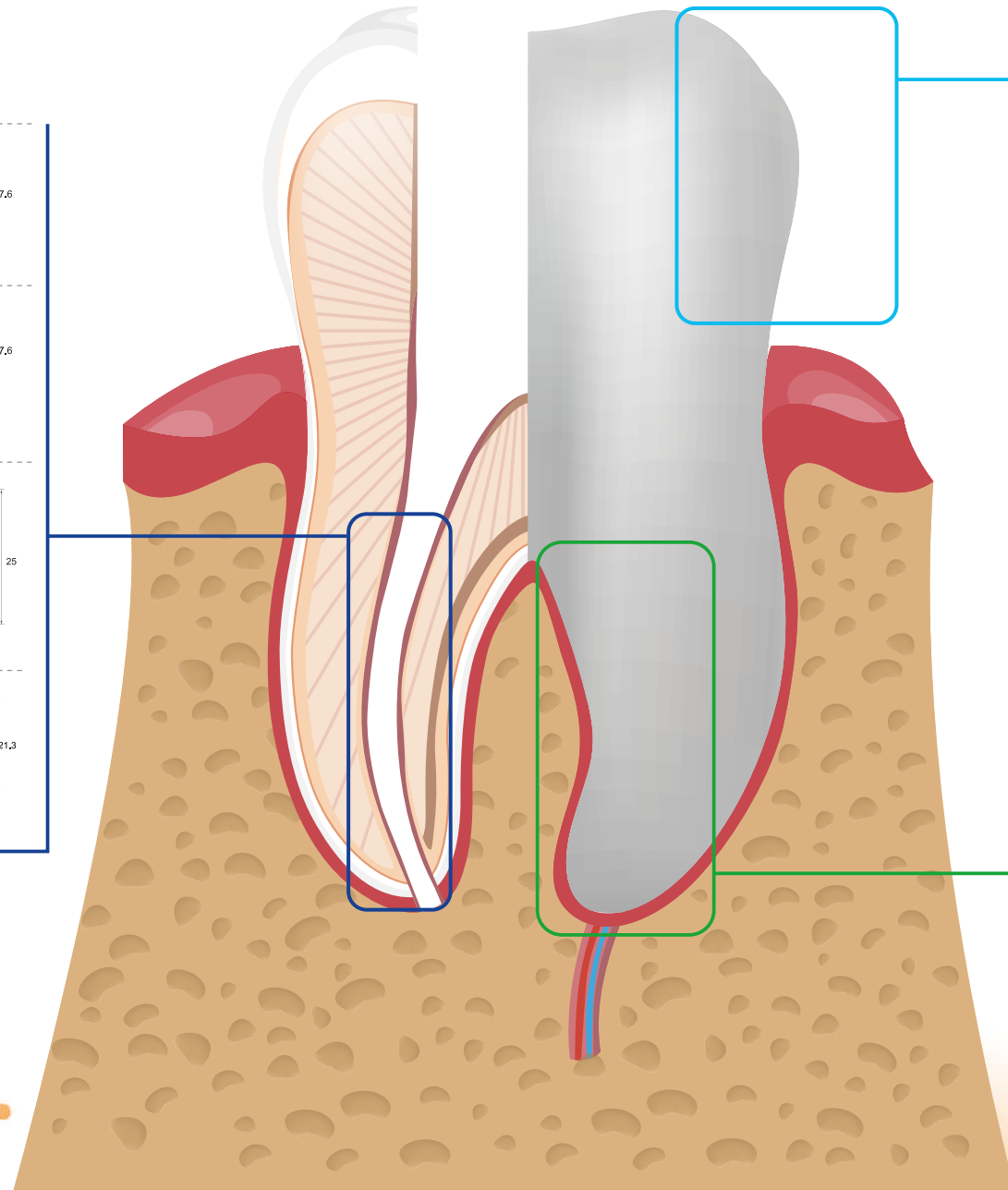

BLANCONE®

Clean&White

Water Jet Tablets

Compresse per idropulsori

Compresse dentali effervescenti
a rapida dissoluzione.

Gradevole sapore di menta,
donano all'acqua un colore blu che evoca igiene e pulizia.

Mantengono il dispositivo
per l'igiene dentale fresco e profumato
prevenendo la formazione di depositi lungo le tubature.

Migliorano la rimozione del biofilm
rilasciando fluoro per prevenire
l'insorgenza di carie e rinforzare lo smalto.



REF 340500

C&W Water Jet Tabs

Compresse per idropulsori 120 pz

BLANCONE
Clean & White
Reveal


Biofilm Disclosing Swabs

Tamponi rivelatori di placca
a due toni Snap -n- go™

Pratici tamponi pre-caricati
con rivelatore di placca a due toni
in igieniche confezioni individuali.

Rilevano in modo distinto il biofilm
di recente formazione ed i depositi calcificati.


Piegando l'estremità con l'anello
il liquido imbeve il tampone all'estremità opposta,
permettendo un'applicazione pulita e mirata.

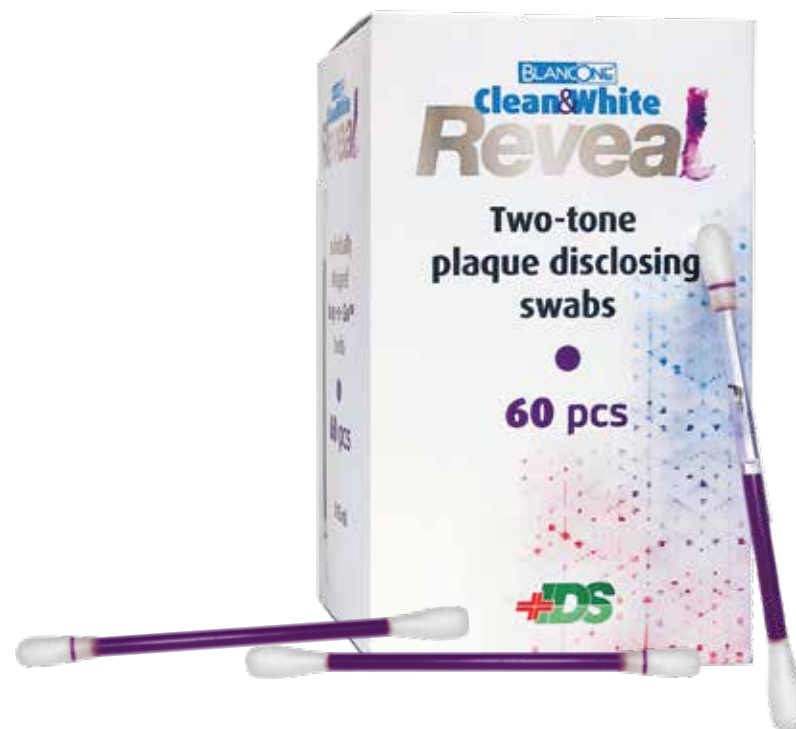

Rilevazione biofilm

Per i migliori risultati:

Per evitare di sporcarsi le dita con la tintura durante l'apertura dei tamponi,
si consiglia di:

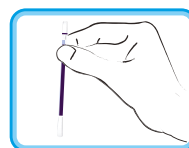


1) Rimuovere il tampone dall'involucro. Tenere il tampone con il segno rotondo colorato verso l'alto. Mettere le dita vicino all'anello.



2) Piegare delicatamente da un lato il segno rotondo colorato. Il liquido scorrerà fino all'estremità inferiore della punta di cotone.



3) Tamponare i denti e il bordo gengivale. Risciacquare delicatamente e mostrare i risultati con uno specchio.

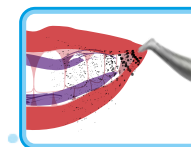

4) Eseguire l'igiene dentale, prestando particolare attenzione alle aree evidenziate.

REF 340401 C&W Reveal - Tamponi rivelatori 60 pz

BLANCONE
Clean&White
OxyGel

Biofilm Soaking Gel

Gel pre operatorio per l'igiene dentale
e la detersione delle tasche paradontali

Grazie all'azione combinata di urea,
perossido d'idrogeno (CP11%) ed EDTA disodico (1%)
dissolve il biofilm ed ammorbidisce i depositi calcificati.

Il perossido svolge un'azione emostatica,
il gel contiene inoltre acido ialuronico
per migliorare la guarigione dei tessuti molli
e nitrato di potassio per ridurre la sensibilità.

La seduta di igiene risulterà più rapida e confortevole
ottimizzando la successiva penetrazione
dei principi sbiancanti.



REF 340345 C&W Oxy Gel - Gel pre operatorio 5 ml

CLICK

Click your smile

**illumina il sorriso
dei tuoi pazienti
in 10 minuti**



BlancOne® CLICK: un rivoluzionario e unico trattamento sbiancante veloce, abbinabile alla seduta di igiene dentale.



Efficace a basse concentrazioni

Per la prima volta abbiamo reso efficace lo sbiancamento in studio a bassa concentrazione di perossido d'idrogeno (<6%), a norma con la Direttiva Europea 84/2011, la più avanzata regolamentazione a tutela della sicurezza dei consumatori.



Senza protezione gengivale

Abbiamo creato gli unici sbiancamenti in studio che non necessitano di protezione delle mucose, eliminando il passaggio più delicato della procedura che può essere eseguita in modo semplice e sicuro.



Agisce in soli 10 minuti

Grazie alla tecnologia fotochimica BlancOne®, la scissione del perossido di carbamide al 16%, che normalmente richiede ore, viene iper accelerata in pochi minuti. Il trattamento è molto più veloce e confortevole e può essere abbinato alla seduta d'igiene dentale.



Senza dolore e sensibilità

Con tempi di azione rapidissimi, tutti i trattamenti in studio BlancOne® non aggrediscono né disidratano lo smalto, non inducono dolore né sensibilità, infatti sono gli unici sul mercato privi di agenti desensibilizzanti e remineralizzanti.




Accessibile e ripetibile

Con sedute veloci e costo molto contenuto, BlancOne® CLICK può essere proposto ad un prezzo accessibile a tutti. Ideale per avvicinare allo sbiancamento, può essere ripetuto frequentemente e introdurre a trattamenti più intensivi.




REF 013012 BlancOne® CLICK
Kit 12 trattamenti sbiancamento veloce
post igiene CP16%

Un'esperienza gratificante

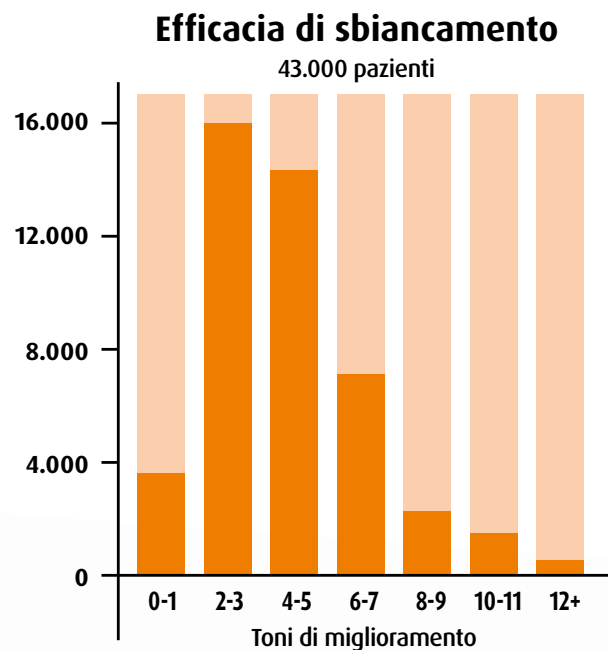

Indice di soddisfazione
2.100 pazienti

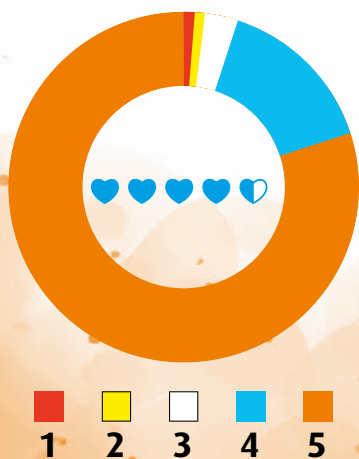

Lampada foto attivante BlancOne® ARCUS



L'innovazione tecnologica di BlancOne® è resa possibile anche dall'esclusiva lampada BlancOne® ARCUS* che **offre molti vantaggi:**


- I **trattamenti BlancOne® sono stati ottimizzati per performare al top** con la lampada **BlancOne® Arcus**.
- 10 potenti led da 5 watt assicurano la **massima efficacia e rapidità nei tempi indicati** dai protocolli BlancOne®.
- L'arco esteso e la disposizione dei led anche alle sue estremità assicurano la **completa attivazione del gel su tutta l'arcata**, laterali compresi.
- Kit CARE incluso con tutti gli **accessori per uno sbiancamento sicuro e confortevole** e un'ottima **comunicazione col paziente**.



Prima seduta

Questo tipo di seduta è indicato come **prima seduta di un percorso C&W**, per i pazienti che eseguono l'igiene una sola volta all'anno o saltuariamente, con notevole sviluppo del **biofilm e calcificazione in depositi duri**. Indicata anche per pazienti con **esigenze particolari** come impianti dentali, brackets ortodontici, tasche profonde o estensive macchie superficiali e che richiedono **un'igiene professionale approfondita**.

Prevede un'attenta valutazione dei tessuti e adeguata **motivazione del paziente** ad una corretta igiene orale domiciliare, sarà inoltre necessario l'uso estensivo dell'ablattore supra e sub gengivale e del manipolo ad aria perio (PAP).

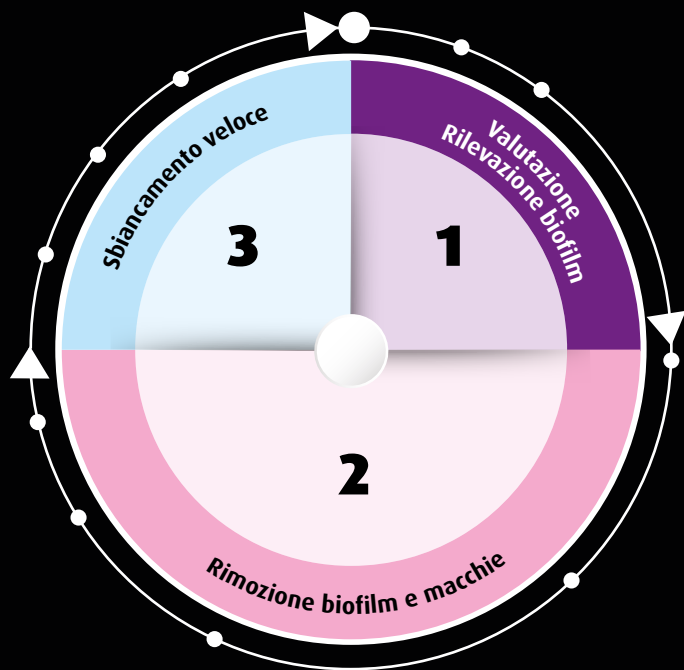


60 minuti

Sedute successive

Questo tipo di seduta può essere pianificata come **mantenimento dopo la seduta iniziale**, per quei pazienti che non presentano situazioni particolari e che aderiscono ad un **programma C&W** che prevede **da 2 a 4 sedute all'anno**.

In base alla frequenza delle sedute C&W è **possibile accorciare i tempi necessari per l'igiene** completando il protocollo C&W in 45 minuti o anche meno.

La **seduta** risulterà quindi **molto veloce, confortevole e gratificante per il paziente**.

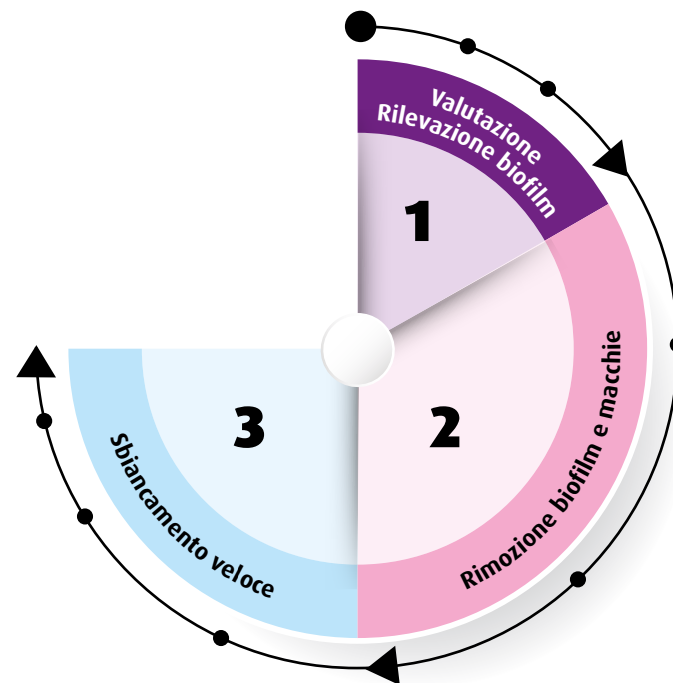

30-45 minuti

Clean&White

Protocollo seduta step by step

1. Valutazione e Rilevazione

1.1 Valutazione

Analisi della condizione dei tessuti molli e duri del cavo orale e documentazione fotografica iniziale.



- Sciacquo con collutorio antisettico.
- Anamnesi.
- Rilevazione della luminosità dentale.
- Documentazione fotografica iniziale.

1.2 Rilevazione del biofilm

Il pratico tampone C&W Reveal, precaricato con rilevatore di placca a due toni, consente di localizzare il biofilm distinguendo quello di recente formazione da quello calcificato, supportando la motivazione del paziente e assicurando la completa rimozione del biofilm.



- a) Applicare il rilevatore di placca con il tampone precaricato C&W Reveal
- b) Risciacquare con la siringa e aspirare per rimuovere l'eccesso di rilevatore.
- c) Documentazione fotografica con rilevatore di placca.



1.3 Motivazione del paziente

La sinergia tra la seduta in studio e l'igiene orale domiciliare da parte del paziente è fondamentale per la cura del sorriso.

Attraverso uno specchio e il rilevatore di placca, istruire e motivare il paziente ad una corretta igiene a casa che preservi la salute dei tessuti fino alla seduta successiva.

Un paziente in salute = un sorriso sano e bello = paziente felice.

2. Rimozione biofilm e macchie

La rimozione del biofilm, delle concrezioni e delle macchie con il dispositivo avanzato per l'igiene dentale C&W Xpower risulta estremamente confortevole per il paziente e ottiene risultati ottimali in tempi ridotti rispetto ad una seduta d'igiene tradizionale.

Molti dei seguenti passaggi dipendono dalle condizioni specifiche del paziente (biofilm calcificato, pazienti fumatori, impianti, malattia parodontale, ecc.).

Nella maggior parte dei pazienti con buona salute orale, una corretta igiene domiciliare e frequenti sedute sedute Clean & White, è normalmente sufficiente l'utilizzo delle sole polveri da profilassi per la rimozione veloce del biofilm sopra gengivale (2.2).

Proteggere il paziente con occhiali, BlancOne® LIPS e protezioni facciali BlancOne®.

2.1 Pre-trattamento (OxyGel)

In caso il paziente presenti concrezioni di biofilm calcificato, applicare il gel parodontale C&W OxyGel a base di perossido di carbamide e acido ialuronico per ammorbidire i depositi calcificati, decontaminare le tasche e lenire i tessuti molli.

Questo passaggio consente una rimozione dei depositi più veloce e confortevole.



- a) Applicare OxyGel nel solco gengivale e sulle concrezioni di biofilm calcificato.
- b) Lasciare agire per 1-2 minuti.
- c) Aspirare il gel.

2.2 Rimozione del biofilm sopra gengivale

Utilizzare manipolo Xpower AP (Air Polishing), polveri Xpower tipo MILD*.
Rimuovere le protezioni e far risciacquare il paziente.



2.3 Rimozione dei depositi calcificati

Utilizzare manipolo per ablazione Xpower S (Scaling):



- Ablazione supra gengivale punte tipo G* o P*, programma G (ablazione Generale).
- Ablazione sub gengivale punte tipo P*, programma P (parodontale).

* Consultare le tavole delle polveri da profilassi e delle punte per ablazione Xpower per maggiori dettagli.

2.4 Rimozione del biofilm sub gengivale

Utilizzare manipolo Xpower PAP (Perio Air Polishing), polveri Xpower tipo MILD*.
Rimuovere le protezioni e far risciacquare il paziente.

2.5 Rimozione delle macchie

Utilizzare del manipolo Xpower AP (Air Polishing), polveri Xpower tipo FAST*.



2.6 Rimuovere le protezioni e far risciacquare il paziente

3. Sbiancamento

A completamento dell'igiene dentale, viene eseguito BlancOne CLICK, l'unico trattamento cosmetico sbiancante che puoi eseguire in pochi minuti subito dopo l'igiene orale.

BlancOne CLICK è un trattamento estremamente delicato su denti e gengive, non richiede protezione gengivale e non crea sensibilità.

3.1 Preparazione del paziente

- Applicare nuovamente BlancOne LIPS, far indossare l'apribocca BlancOne, le protezioni facciali BlancOne e gli occhiali con filtro per luce blu.
- Rilevazione della luminosità dentale.
- Documentazione fotografica post-igiene/pre-sbiancamento.



3.2 Applicazione del gel sbiancante



Una volta preparato il gel sbiancante, applicare uno strato di 1-2mm sulla superficie vestibolare dei denti da sbiancare.

3.3 Foto attivazione del gel sbiancante



Foto attivare il gel sbiancante per 10 minuti, con lampada foto attivatrice BlancOne ARCUS, mantenendo la testa della lampada a 5-10 cm dalla bocca del paziente.

3.4 Rimozione del gel sbiancante



Rimuovere il gel esausto con un rullo di cotone, aspirare i residui e risciacquare con la siringa aria-acqua.

3.5 Lucidatura e trattamento dello smalto

Lucidare i denti secondo la modalità preferita applicando eventuali trattamenti allo smalto.

3.6 Diagnosi e follow-up

Concludere la seduta condividendo il risultato con il paziente attraverso uno specchio.



- a) Rilevazione della luminosità dentale.
- b) Documentazione fotografica finale.
- c) Condividere e discutere il risultato col paziente.
- d) Eseguire diagnosi finale della seduta e definire il follow-up:
 - In caso il paziente desideri incrementare ulteriormente la luminosità del proprio sorriso, proporre un trattamento di sbiancamento intensivo BlancOne® in studio (TOUCH-ULTRA) o a casa (HOME).
 - Se il paziente è soddisfatto del risultato raggiunto, fissare la prossima seduta Clean&White a 3-6 mesi.

Clean&White

Materiali marketing

Busta C&W
Pannello da tavolo C&W
Brochure pazienti C&W
Set 3 poster C&W

Roll up C&W
Palette selfie C&W
Video C&W per sala d'aspetto (download)
Materiali C&W social (download)





cleanwhitepro.eu



IDS Spa - Via San Cristoforo, 28/10 - 17100 Savona - Italia
Tel. +39 019 862080 - Fax +39 019 2304865
email: info@idsdental.it - www.idsdental.it