

viroXid® SD10 SPRAY RAPIDO

Disinfettante rapido per superfici a base alcolica

VIROXID® SD10 SPRAY RAPIDO

è una soluzione alcolica contenente alcool etilico denaturato speciale al 70 % v/v.

La soluzione è incolore, perfettamente limpida
e con una gradevole profumazione di limone.

Una volta dispersa in strato sottile sulla superficie
evapora facilmente senza lasciare alcuna traccia.

Caratteristiche principali

Per la disinfezione delle superfici di dispositivi medici non invasivi,
appositamente ideato per l'ambiente medico e dentale.

Con una formula a base alcolica, **VIROXID® SD10 SPRAY RAPIDO** è ideale per l'utilizzo su superfici resistenti all'alcool
all'interno degli studi dentistici dove tempi di contatto brevi sono importanti, ad esempio tra un paziente e l'altro.

Questo disinfettante è altamente efficace contro virus con involucro inclusi Coronavirus,
HBV, HCV e HIV e virus senza involucro come Adenovirus e Norovirus.

Un rapido tempo di contatto raccomandato pari a soli 60 secondi, rende questo spray pronto all'uso
ideale per l'utilizzo tra un paziente e l'altro, lasciando un gradevole profumo di limone.

Composizione

100 g di soluzione contengono:

	Ingrediente	g
Principi attivi	Alcool etilico	70,00
Eccipienti	Denaturanti e acqua depurata q.b. a	100,00

Istruzioni per l'uso

Spruzzare il disinfettante su superfici e oggetti da una distanza di circa 30 cm in modo da inumidirli completamente
e lasciarlo agire per più di 60 secondi (per ottenere piena efficacia, lasciare agire per 5 minuti).

Far evaporare lo spray o strofinare con un fazzoletto di carta pulito o una salvietta per superfici.

Non usare su superfici sensibili all'alcol.

Spettro di efficacia e tempi di contatto

Battericida - Fungicida Lieviticida Tubercolicida - Virucida (HIV-HBV-HCV)

Attivo in 1 minuto su pulito e 5 minuti in presenza di sporco

Confezionamento

Codice **D070101** 12 flaconi da 1 litro pronto all'uso + 4 nebulizzatori spray

Tutti gli imballi primari sono conformi alle specifiche tecniche previste dalla Farmacopea.

Tali materiali non contengono lattice e sono perfettamente compatibili con tutti i componenti del formulato.



Distribuito in esclusiva da: **IDS S.p.A.**
Via S. Cristoforo 28/10 - 17100 Savona - Italy
www.ids dental.it - info@idsdental.it

Rev. 0.0 - 10/2023