



## PROTOCOLLO OPERATIVO


### 1 Posizionamento del contenitore

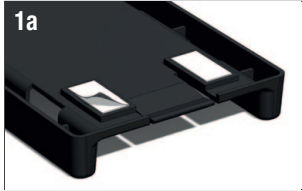

1a. Rimuovere le pellicole protettive dagli adesivi sotto la base del contenitore.

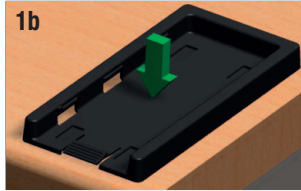

1b. Posizionare la base su un piano di lavoro liscio e premere per far aderire la base saldamente.

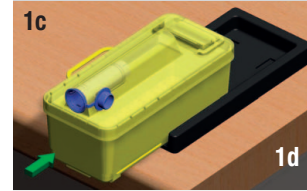

1c. Far scorrere il contenitore sulla base sino allo scatto di posizionamento.

1d. Provare a spingere il contenitore in senso contrario, per assicurarsi che sia bloccato correttamente.

### 2 Inserimento dell'ago



2a. Allineare il foro dell'adattatore blu con la tacca posizionata sul corpo siringa e spingere a fondo.



2b. Rimuovere il cappuccio posteriore dell'ago e avvitare l'ago sull'adattatore fino a fondo corsa.



2c. Girare in senso orario il collare di bloccaggio del manicotto (come indicato dalla freccia).




2d. Far scorrere il manicotto protettivo trasparente fino a fondo corsa per ricoprire l'ago (come indicato dalla freccia).



2e. Girare in senso anti-orario il collare per bloccare il manicotto (come indicato dalla freccia).

**\* ATTENZIONE:** assicurarsi che il blocco del collare sia attivato per evitare punture accidentali

### 3 Caricamento della tubofiala

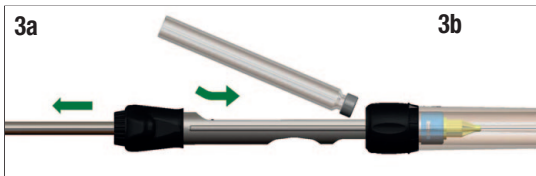

3a. Tirare indietro lo stantuffo e trattenerlo in posizione.

3b. Inserire la tubofiala nel corpo siringa e rilasciare lo stantuffo per bloccare la tubofiala.

### 4 Utilizzo della siringa

- Impugnare la siringa e sbloccare il collare ruotandolo in senso orario (disallineare le frecce - 2C).
- Tirare indietro il manicotto trasparente.
- Bloccare nuovamente il collare ruotandolo in senso antiorario (allineare le frecce - 2E).
- Eseguire l'anestesia con la solita procedura.
- Sbloccare nuovamente il collare ruotandolo in senso orario (disallineare le frecce - 2C).
- Spingere avanti il manicotto trasparente.
- Bloccare nuovamente il collare ruotandolo in senso antiorario (allineare le frecce - 2E).
- Ripetere le operazioni sopra descritte, qualora fosse necessaria una nuova anestesia.
- Caricare un'altra tubofiala come mostrato al punto 3.


### 5 Cambio della tubofiala

- Mantenendo il manicotto bloccato sopra l'ago, tirare indietro lo stantuffo (3A) e mantenere in posizione.
- Prendere la tubofiala usata con pollice e indice.
- Spingere la tubofiala verso l'alto e indietro per rimuoverla.
- Inserire una nuova tubofiala come indicato nella sezione 3


### 6 Rimozione dell'ago



6a. Mantenendo l'ago protetto dal manicotto trasparente, inserire la siringa nel foro del contenitore per aghi.

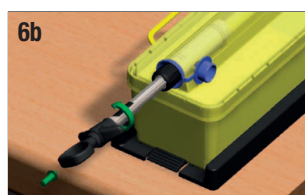


6b. Impugnando la siringa come per eseguire un'anestesia ed esercitando una leggera pressione in avanti, ruotare la siringa in senso antiorario quanto basta per sbloccare il collare, e spingere in avanti verso il contenitore.

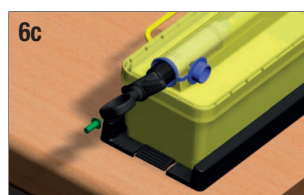

6c. Spingere completamente la siringa in avanti\*\* - la siringa è ora bloccata nel contenitore.

**\*\* ATTENZIONE:** La siringa, la siringa deve essere interamente inserita nel contenitore per attivare il blocco. In caso contrario è possibile incorrere in una puntura accidentale.

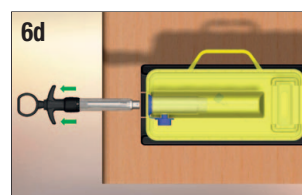

6d. Con indice e medio sotto l'impugnatura a "T" (come indicato dalle frecce), tirare la siringa indietro per rimuovere l'ago.

### 7 Rimozione del contenitore

- Il contenitore può essere riempito di aghi al massimo sino alla linea indicata sul lato.
- Chiudere i tappi davanti e sopra e spingerli per bloccarli.
- Premere la leva della base nera e far scivolare indietro il contenitore per staccarlo dalla base.
- Trasportare il contenitore per mezzo della maniglia, nell'area per lo smaltimento.
- Sostituire con un nuovo contenitore come mostrato nella sezione 1.

**Nota: Smaltire il contenitore pieno come Rifiuto Pericoloso (D.P.R. N. 254 DEL 15/07/2003)**



### 8 Pulizia e sterilizzazione

#### Pulizia

- Lavare la siringa per eliminare residui, sangue e saliva eventualmente presenti
- Dopo la pulizia, disinfettare e sterilizzare la siringa secondo i protocolli e le direttive previsti per la prevenzione delle infezioni.

#### Disinfezione

- La siringa deve essere disinfettata con un disinfettante registrato come dispositivo medico.
- Applicare il disinfettante strofinando sulle superfici esterne utilizzando un panno adatto.
- Non vaporizzare il disinfettante direttamente sulla siringa. Non disinfettare la siringa per immersione.

#### Sterilizzazione


- Dopo la pulizia e disinfezione, svitare il collare di bloccaggio e separare il gruppo con lo stantuffo.
- Disporre entrambe le parti della siringa in busta per la sterilizzazione.
- Inserire in autoclave e sterilizzare con un ciclo standard a 134°C per almeno 3 minuti.
- Utilizzare esclusivamente un metodo di sterilizzazione in autoclave a vapore.

**Nota:** Non rimuovere e sostituire un ago sulla siringa durante una procedura sullo stesso paziente. Se necessario l'utilizzo di un nuovo ago utilizzare una siringa sterile.

### 9 Sostituzione del manicotto esterno




9a. Sbloccare e spostare nella posizione indicata.

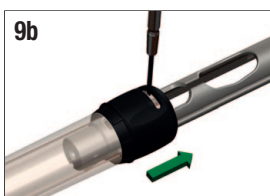

9b. Inserire uno strumento adatto nel foro del collare, spingere e separare il collare dal manicotto.



9c. Togliere la linguetta di sicurezza e rimuovere il manicotto dal corpo siringa.

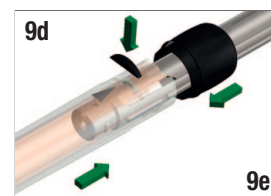

9d. Riposizionare un nuovo manicotto, inserire la linguetta di sicurezza, spingere verso l'interno e slittare il collare a chiudere.  
9e. Controllare il funzionamento del collare di bloccaggio.