



Produkty do pielęgnacji  
Twojego pięknego uśmiechu





## Rytuały pielęgnacji dla Twojego uśmiechu

Zestaw BlancOne® Rituals to 5 produktów dedykowanych upiększaniu i pielęgnacji Twojego uśmiechu, idealnych do utrzymania efektów uzyskanych dzięki profesjonalnym zabiegom wybielania BlancOne.

Dzięki nim chcielibyśmy zaproponować kilka prostych i szybkich, codziennych rytuałów do wykonania rano i wieczorem.


Produkty BlancOne® Rituals są zapakowane do ekskluzywnego pudełka z limitowanej edycji SMILE BOX. Po zużyciu produktów i usunięciu wewnętrznej części biodegradowalnego materiału, SMILE BOX staje się pudełkiem pamięci, w którym można gromadzić zdjęcia, kartki, pamiątki oraz drobne przedmioty związane ze szczęśliwymi chwilami Twojego życia.

**SMILE BOX - pudełko pełne Twoich najjaśniejszych uśmiechów!**





# 5 produktów BlancOne® Rituals dla Twojego uśmiechu

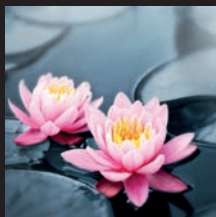

純度  
*Czystość*

Szczoteczka wybielająca



BRUSH




明晰  
*Przejrzystość*

Pasta wybielająca



DUETTO  
ACTIVE

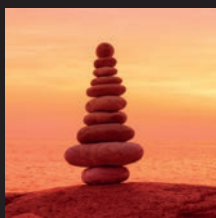

平衡  
*Równowaga*

Serum dla zębów i dziąseł



DUETTO  
CARE



亮度  
*Jasność*

Pióro wybielające



STICK



愛情  
*Ochrona*

Balsam do ust



LIPS



BRUSH

## Rytuał Czystości

### Wybielająca szczoteczka do zębów

BlancOne® BRUSH

jest **naturalnym środkiem wybielającym**  
ze specjalnym włosiem  
zawierającym węglan wapnia.

Służy do **skutecznego usuwania płytki  
bakteryjnej oraz osadów na zębach**  
(wysoce zalecane dla palaczy).

**Pomaga w usuwaniu kamienia  
nazębnego.**

Twoje zęby staną się bielsze po  
każdym użyciu BlancOne® BRUSH.



純度  
*Czystość*

BLANCONE® BRUSH





# 明晰

*Przejrzystość*

**BLANCONE**<sup>®</sup> DUETTO ACTIVE  
↓



## Rytuał Przejrzystości

### Wybielająca pasta do zębów

BlancOne<sup>®</sup> DUETTO ACTIVE

działa intensywnie wybielająco  
dzięki **potrójnemu połączeniu**  
naturalnych enzymów.

Usuwa **powierzchowne przebarwienia**  
bez uszkodzania szkliwa.

Mikrogranulki nadtlenu karbamidu,  
zawarte w paście, uwalniają aktywny  
tlen, który penetruje szkliwo  
i odbarwia **głębokie pigmentacje**  
**struktury zęba.**







# 平衡

*Równowaga*

**BLANCONE**<sup>®</sup>

DUETTO  
CARE  
+

DUETTO  
CARE  
+

## Rytuał Równowagi

### Serum do zębów i dziąseł

BlancOne<sup>®</sup> DUETTO CARE.

Skład pasty jest oparty na kompleksie naturalnych i aktywnych składników, gwarantujących

**działanie antybakteryjne**  
i przeciwutleniające.

DUETTO CARE **dostarcza witamin,**  
**remineralizuje szkliwo,**  
jednocześnie usuwając plamy  
i polerując szkliwo.





STICK

## Rytuał Jasności

### Pióro wybielające

BlancOne® STICK

może służyć **do stabilizacji efektów zabiegów gabinetowych**, jako okresowy zabieg pielęgnacyjny w celu **ożywienia bieli zębów i usunięcia przebarwień**.

Lub po prostu jako procedura makijażu, aby **rozażnić Twój uśmiech**.

# 亮度

*Jasność*

**BLANCONE®** STICK









LIPS

## Rytuał Ochrony

### Balsam do ust

Usta są oprawą Twojego uśmiechu.

BlancOne® LIPS, dzięki swojej w 100% naturalnej formule, zawierającej wosk pszczelej, olej konopny, masło shea i witaminę E, będzie **chronił Twoje usta** przed wolnymi rodnikami, **odżywił je i nawilżał**. A to wszystko dodatkowo w wyjątkowych smakach.



愛情  
Ochrona

BLANCONE®

LIPS

## BRUSH

### Pomoc w wybielaniu Twoich zębów

#### JAK UŻYWAĆ?

Suchą szczoteczką BlancOne® BRUSH szczotkuj przednie zęby, bez wody i pasty, przesuwając się od szyjki zębowej do brzegu siecznego.

W przypadku szczególnie wrażliwych dziąseł zwilż szczoteczkę BlancOne® BRUSH gorącą wodą w celu zmiękczenia włosa. Wyplucz BlancOne® BRUSH, odłóż do pudełka i kontynuuj czyszczenie przy użyciu tradycyjnej szczoteczki razem z pastami do zębów BlancOne® DUETTO.



## DUETTO

### Domowy, dwufazowy system wybielania zębów

#### UWAGI

BlancOne® DUETTO stosuje się zamiast zwykłej pasty do zębów dwa razy dziennie.

BlancOne® DUETTO ACTIVE i BlancOne® DUETTO CARE należy stosować alternatywnie, zgodnie z 1 z poniższych programów:

- **Podtrzymywanie efektu wybielenia gabinetowego:** użyj obu środków alternatywnie, na przykład BlancOne DUETTO ACTIVE rano, a BlancOne® DUETTO CARE wieczorem.
- **Intensywne wybielenie:** zacznij od BlancOne® DUETTO ACTIVE, rano i wieczorem, nie dłużej niż 2 tygodnie. Następnie używaj BlancOne® DUETTO CARE przez kolejne 2 tygodnie.
- **Wrażliwe zęby:** wstrzymaj stosowanie BlancOne® DUETTO ACTIVE i używaj BlancOne® DUETTO CARE tylko do momentu ustąpienia wrażliwości, a następnie ponownie wróć do wybranego programu.





# STICK

## Pióro wybielające

### ZALECENIA

**Stabilizacja** - stosować raz dziennie, najlepiej wieczorem przez 2 tyg., bezpośrednio po zabiegu w gabinecie w celu ustabilizowania i wzmocnienia efektu wybielania.

**Utrzymanie efektu** - maksymalnie raz w miesiącu można wykonać cykl tygodniowy, używając pióra raz dziennie w celu odświeżenia odcienia zębów.

**Usuwanie przebarwień** - stosować rano i wieczorem, dokładnie pocierając przebarwioną powierzchnię. Powtarzać aż do zniknięcia przebarwienia.

**Makijaż** - przy specjalnych okazjach żel można nakładać na oba łuki, aby rozjaśnić uśmiech.

### OSTRZEŻENIA UNII EUROPEJSKIEJ

- Uwalnia się 5,6% H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>.
- Nie stosować u osób poniżej 18 roku życia.
- Do sprzedaży wyłącznie lekarzom denty stom. Podczas każdego cyklu użytkowania pierwsza aplikacja musi być wykonana wyłącznie przez lekarza denty stę lub pod jego bezpośrednim nadzorem, o ile zapewniony jest równoważny poziom bezpieczeństwa. Następnie produkt może zostać dostarczony konsumentowi w celu dokończenia cyklu użytkowania.

### JAK UŻYWAĆ?

- 1) Umyj zęby szczoteczką i pastą.
- 2) Zdejmij nasadkę i odwróć pióro, aby widzieć jego dolną część. Przekręć ją 3-4 razy zgodnie z ruchem wskazówek zegara (słychać kliknięcia), aby zwilżyć szczoteczkę odpowiednią ilością żelu.

**WAŻNA UWAGA:** przy pierwszym użyciu może być konieczne przekręcenie nawet 6-8 razy, aby pojawił się żel na szczoteczce.

- 3) Nałóż żel na zęby i wcieraj go w ich powierzchnię przez 2 minuty. W tym czasie regularnie nawilżaj szczoteczkę kolejną ilością żelu, obracając spód pióra w prawo. Zwykle potrzeba przekręcić pióro 10-12 razy, aby nałożyć odpowiednią ilość żelu wybielającego podczas jednego zabiegu.
- 4) Nadmiar spływającego żelu wypłuj bez sfluowania wodą. Nie jedz i nie pij przez 30 minut.
- 5) Po zakończeniu zabiegu szczoteczkę silikonową wyczyść chusteczką i zamknij pióro nasadką.

### ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Przed wybielaniem obowiązkowe jest badanie stomatologiczne.
- Wybielanie nie powoduje rozjaśnienia koron porcelanowych i uzupełnień denty stycznych.
- Przez co najmniej 6 godzin po zabiegu wybielania nie wolno używać wyrobów tytoniowych i nie pić kawy ani czerwonego wina.
- Nie jest przeznaczony do stosowania przez kobiety w ciąży. Jeśli karmisz piersią, skonsultuj się z lekarzem.
- Unikaj kontaktu z tkankami innymi niż zęby.
- Kwaśne pokarmy/soki mogą powodować nadwrażliwość, jeśli zostaną spożyte krótko po wybielaniu.
- U osób z chorobami przyzębia może dojść do podrażnienia tkanki dziąseł.
- W przypadku podrażnienia dziąseł lub nadwrażliwości zębów należy zaprzestać stosowania produktu i skonsultować się z denty stą. Trzymać produkt poza zasięgiem dzieci.
- Unikać kontaktu z oczami. W przypadku kontaktu przemywać oczy ostrożnie wodą przez kilka minut. Skonsultować się z lekarzem podczas procesu wybielania. W przypadku połknięcia w małych ilościach produkt jest nieszkodliwy, w przeciwnym razie skontaktować się z lekarzem.
- Niektórzy użytkownicy mogą odczuwać nadwrażliwość lub podrażnienie dziąseł. Chociaż w większości przypadków są one łagodne i przemijające, czasami może być konieczny kontakt z denty stą.
- Nie stosować dłużej niż 14 kolejnych dni; Zalecana jest 2-tygodniowa przerwa między każdym cyklem aplikacji (14 dni).

### SKŁADNIKI

Gliceryna, glikol propylenowy, nadtlenek karbamiu 16%, woda dejonizowana, karbomer, aromat (miętowy), EDTA, sacharyna sodowa, wodorotlenek sodu.



# Poranne rytuały



純度

*Czystość*

1

BRUSH



明晰

*Przeźerność*

2

DUETTO  
ACTIVE



愛情

*Ochrona*

3

LIPS

# Wieczorne rytuały



純度

*Czystość*

1

BRUSH



平衡

*Równowaga*

2

DUETTO  
CARE



亮度

*Jasność*

3

STICK




愛情

*Ochrona*

4

LIPS



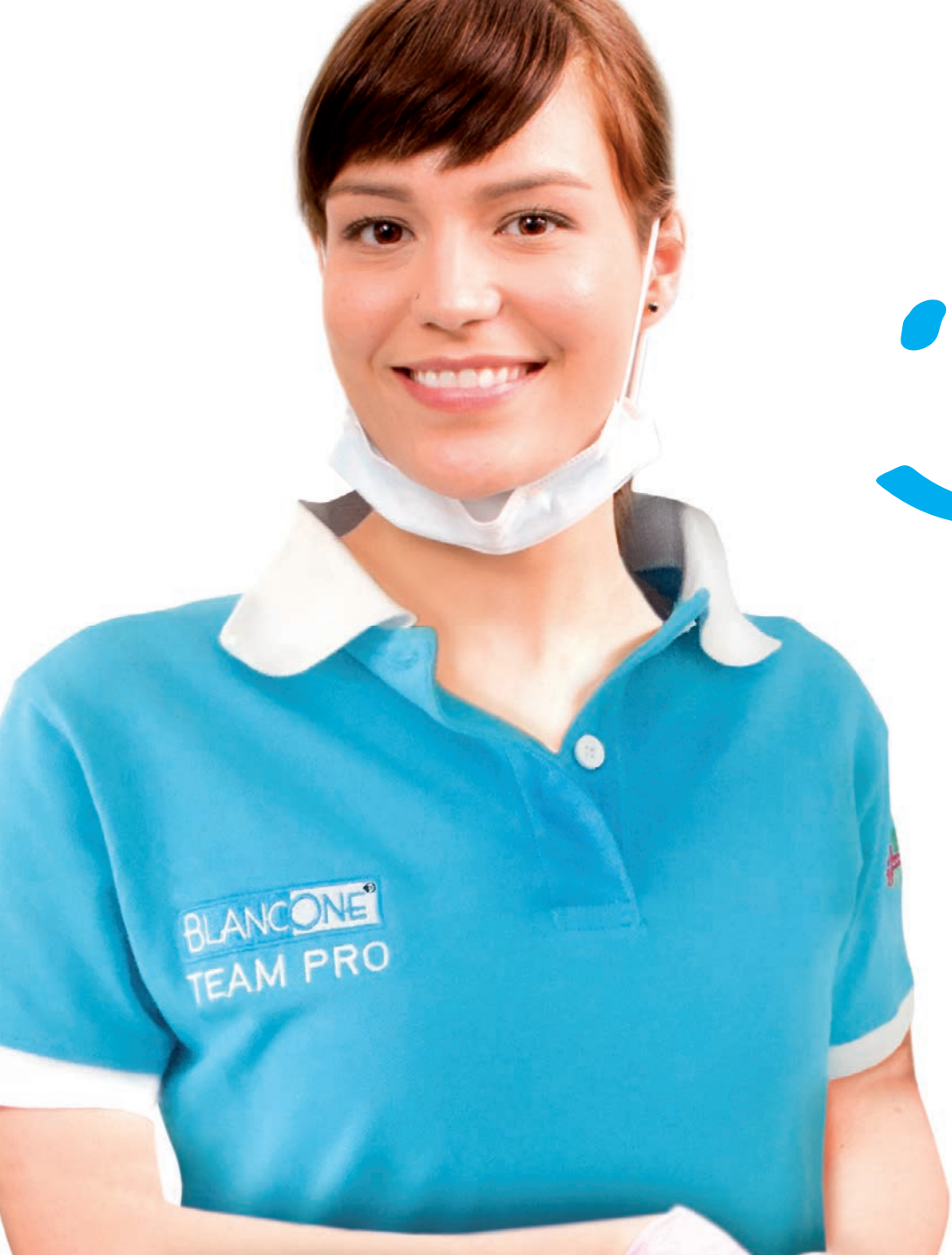

# Odkryj radość bielszego uśmiechu

W autoryzowanych centrach BlancOne®  
znajdziesz najbezpieczniejsze, najbardziej innowacyjne  
i profesjonalne rozwiązania wybielające,  
które sprawią, że Twój uśmiech będzie zdrowy i piękny.

Podczas regularnych sesji higieny jamy ustnej  
będziesz w stanie zachować biel zębów,  
a eksperci od produktów BlancOne® zawsze doradzą jak  
uzyskać jeszcze jaśniejsze zęby i jak właściwie o nie dbać.

Zapoznaj się z BlancOne® Rituals i zacznij je stosować w domu,  
aby Twój uśmiech był zawsze w doskonałej kondycji.



**Jeden powód więcej do uśmiechu**



**BLANCCONE<sup>®</sup>**  
*Rituals*



**Jeszcze jeden powód do uśmiechu**

 **blancone polska**

 **blancone polska**

**Wyłączny dystrybutor w Polsce:**

ORTO TRADING, ul. Husarii 11 B, 02-951 Warszawa  
tel. 22 651 84 09, 734 403 778, 696 620 063

[www.blancone.pl](http://www.blancone.pl)  
[www.blancone.eu](http://www.blancone.eu)